

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

### Medizinprodukt

# AUGENTROPFEN

(Natriumhyaluronat 0,15 %)



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

AUGENTROPFEN sind ein steriles konservierungsmittelfreies Produkt und bilden einen viskoelastischen, klaren Schutzfilm auf der Hornhaut. Sie bestehen ausschließlich aus natürlichen, biologischen Substanzen.

AUGENTROPFEN schützen und befeuchten die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig. Dadurch bewirken sie lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden in Zusammenhang mit

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge,
- bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch
- Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.

#### Anwendungsgebiet:

Augentropfen zum Schutz, Befeuchtung und Gleitfähigkeit der Augenoberfläche.

#### Zusammensetzung:

Natriumhyaluronat (0,15 %), Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser.

#### Dosierungsanleitung und Anwendung:

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis Behältnisses ab (nicht ziehen). Geben Sie ein oder zwei Tropfen in jedes Auge oder auf die Innenseite der Kontaktlinse.

Wenn Sie anhaltende Probleme haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Augenarzt!

#### Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.

Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren.

Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt mit der Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses vermeiden. Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da AUGENTROPFEN keine Konservierungsmittel enthalten, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.

Nicht gleichzeitig zusammen mit Augenarzneimitteln in das Auge eintropfen.

Nicht an infizierten Augen anwenden.

Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.

Verwenden Sie AUGENTROPFEN nicht nach Ablauf des Verfalldatums.

Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.

AUGENTROPFEN enthält Phosphatpuffer. Bei längerfristiger Anwendung und bei Funktionsstörungen der Hornhaut kann die Anwendung von AUGENTROPFEN zu Ausfällungen von Kalziumsalzen in der Hornhaut führen.

 : Chargennummer und Verfalldatum ist auf dem Einmal-Behältnis und der Faltschachtel-Oberseite aufgeprägt.

#### Packungsgröße:

15 x 0,35 ml Ein-Dosis Behältnisse.

#### Hersteller:

Dr. Kleine Pharma GmbH

Opalstraße 1

D-33739 Bielefeld  0297



Nicht wiederverwenden.



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Bei 2°C bis 25°C lagern.  
Vor Frost schützen.



Aseptische Herstellung.



Gebrauchsanweisung beachten.

Stand der Information: 047\_REV03 / 2017.01

29.0447.01  
255009-01